



Unser neues Verpackungskonzept

Viele Vorteile zum
gleichen Preis!

General Implants



- ✓ **Doppelte Sterilbarriere**
5 Jahre Sterilität
- ✓ **Verbessertes Handling**
für Behandler und Assistenz
- ✓ **Direkte Produktentnahme**
mit Eindrehschlüssel
- ✓ **Farbcodiertes Etikett**
Ein Griff zum richtigen
Durchmesser
- ✓ **Versiegelte Umverpackung**
mit praktischer Aufreißblase



General Implants
GmbH Deutschland

Max-Planck-Straße 39

78052 Villingen-Schwenningen


Phone +49 (77 21) 998 22-42

Fax +49 (77 21) 998 22-55

info@general-implants.com

www.general-implants.com

Die Vorgehensweise – Schritt für Schritt

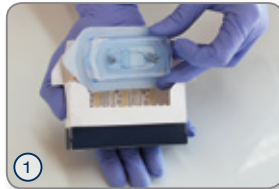

① Umverpackung mittels Aufreißlasche öffnen und Sterilblister entnehmen



② Tyvek-Folie des Außenblisters abziehen und Innenblister entnehmen



③ Tyvek-Folie des Innenblisters abziehen



④ Eindreheschlüssel direkt ins Implantat einführen und entnehmen



⑤ Schutzdeckel für Einheitschraube abnehmen



⑥ Einheitschraube mittels Eindreheschlüssel entnehmen